




**ADVERTENCIA
GENERAL
SOBRE EL USO
DE IMANES**

begaÜss

COLOCACIÓN CORRECTA DEL IMÁN BEGAÜSS

Los Imanes **begaÜss** deben colocarse siempre de la manera que indicamos a continuación para obtener los resultados esperados.

- Dé una vuelta con la venda elástica alrededor de la zona de la dolencia.
- Enganche el imán a la venda con el velcro. El velcro nunca debe estar en contacto con la piel. El logo del imán debe quedar a la vista y no tapado. Eso indicará que está bien colocado.
- Continúe dando vueltas a la venda alrededor de la dolencia tapando el imán.

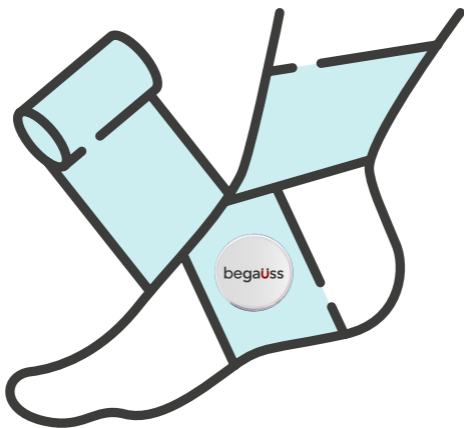

ADVERTENCIAS GENERALES

Los imanes de alta potencia **begaÜss** deben usarse exclusivamente para el uso previsto al comprar el producto (tratamiento de dolencias). En términos de manejo de imanes, se deben seguir las siguientes precauciones:

- Mantener siempre los imanes a una distancia mínima de 20cm. de aparatos eléctricos, ordenadores, teléfonos móviles, televisores, tarjetas de crédito, etc.
- No sacar el imán de su cubierta.
- Cuando no utilice el imán, guárdelo en un recipiente seco y manténgalo lejos de dispositivos electrónicos.
- Manipular los imanes con cuidado (no golpear, lanzar...), prestando especial atención en caso de usar varios imanes a la vez (riesgo de contusiones). En caso de caída o golpe sobre una superficie dura, la cubierta puede romperse.
- Las vendas son soportes para el imán, con su uso se irán desgastando y deberán renovarse con el tiempo.
- Mantener lejos del alcance de niños (no son un juguete).
- No mojar los imanes.
- Al aplicar el imán, seguir las instrucciones mostradas en el vídeo ([link](#)). Colocar siempre primero la venda y a continuación el imán sobre la venda por el velcro (logo mirando hacia fuera).
- En caso de volar y si desea llevar consigo el imán, consulte con la compañía aérea posibles limitaciones o restricciones.
- Si la distancia entre el imán y la dolencia es muy superior a la estándar por algún problema de sobrepeso, no podemos garantizar en correcto funcionamiento de la solución.
- Por precaución no se recomienda su uso con niños menores de 8 años.

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS Y ABSOLUTAS

RELATIVAS (a consultar con su médico)

- Personas con hiper/hipotensión severa
- Estados de preinfarto
- Hemorragias
- Micosis
- Marcapasos
- Placas metálicas
- Tuberculosis
- Enfermedades infecciosas
- Enfermedades neurológicas
- Bombas de insulina
- Implante coclear
- Audífonos

ABSOLUTAS (no usar imanes en ninguno de los casos)

- Embolia
- Angina de pecho
- Claudicación intermitente
- Angioplastia diabética
- Insuficiencia coronaria
- Embarazo
- Patologías tumorales
- En mujeres durante el período menstrual, evitar poner imanes en la zona abdominal
- Implantes para el dolor como puedan ser, los neuroestimuladores medulares
- Neuroestimuladores para Parkinson

PELIGROS A TENER EN CUENTA



OBJETOS ELECTRÓNICOS Y TARJETAS MAGNÉTICAS

Mantener los imanes lejos de aparatos electrónicos ya que éstos se pueden estropear.

No dejar los imanes cerca de tarjetas con chips o bandas magnéticas ya que podrían dejar de funcionar.



CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA E INGESTIÓN

Los imanes están hechos de metal y son conductores de corriente eléctrica. Si los niños intentan meter un imán en un enchufe, podrían electrocutarse.

Comuníquese inmediatamente con su pediatra o teléfono de emergencias si sospecha que su hijo se ha tragado o ha sido lesionado con un imán.



CONTUSIONES

Los imanes grandes tienen una gran fuerza de atracción.

- En caso de uso imprudente, podría pillarse los dedos o la piel entre los imanes. Esto puede provocar contusiones y hematomas en las áreas afectadas.
- Los imanes muy grandes pueden causar fracturas óseas debido a su fuerza.
- En el momento de manipular varios imanes, asegúrese de manipular uno a uno y de mantenerlos lo más alejados posible unos de los otros. En el caso que se junten, separar con cuidado evitando el uso de objetos punzantes.



MARCAPASOS

Los imanes pueden alterar el funcionamiento de marcapasos y de desfibriladores implantados. En caso de duda consulte con su médico.

- Un marcapasos podría cambiarse al modo de prueba, lo que provocaría una indisposición.
- Un desfibrilador podría incluso dejar de funcionar.
- Si lleva alguno de estos dispositivos, manténgase a una distancia prudente de los imanes.
- Advierta siempre a las personas que lleven este tipo de dispositivos de su proximidad a los imanes.

begaÜss

www.begauss.com